



PARO-robotin käyttöohje

(reilusti lyhennetty versio, englanniksi on saatavilla koko ohje)

Ennen kuin käytät Paroa, lataa sen akku täyteen, latausohje on alempana. Anna akun tyhjentyä kokonaan ennen kuin lataat sitä uudelleen.

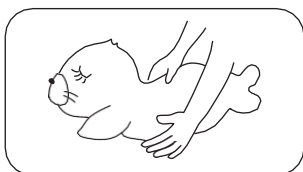


1. Aseta Paro vaakatasoon esim. syliin, pöydälle tai lattialle siten, että Paro makaa **mahallaan**.

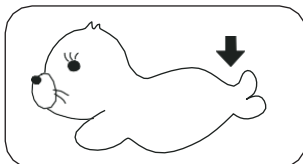

2. Paina Paron virtakytkintä. Kytkin sijaitsee Paron pyrstökarvojen alla.

3. Paro alkaa liikkua ja äännellä ja voit aloittaa sen käytön.

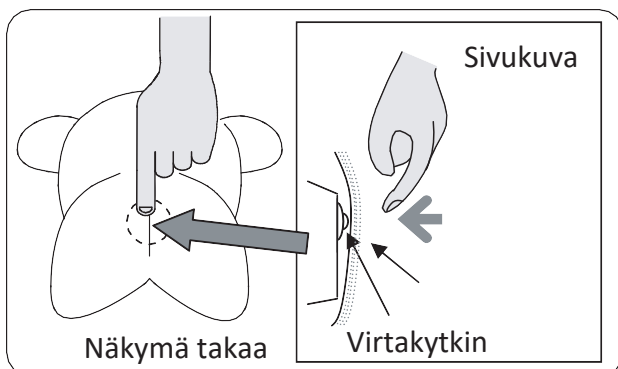

Kun silität Paroa hellästi, se äänтелеe iloisesti ja ilmaisee pitävänsä kosketuksesta.

Paro on herkkä valolle: jos sen silmiin osuu kirkasta valoa, se sulkee silmänsä.

Paroa ei saa vetää viiksikarvoista. Kosketa viiksiä varovasti.


Paro tunnistaa, milloin sitä käsitellään hellästi. Jos pitelet Paroa liian rajusti, se hermostuu.

Paron pään ja raajojen liikkeitä ei saa rajoittaa voimalla/väkisin.



Puhu Parolle, se oppii tunnistamaan nimensä ja tunnistaa äänensävyjä.

Paro ilmaisee tunteitaan sulkemalla ja avaamalla silmiään sekä liikuttamalla päätä ja räpylöitä.

Kun Paroa ei käytetä, se tulee sammuttaa painamalla virtakytkintä.

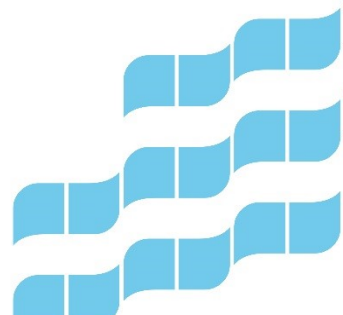

PAROn sensorit ja tunteet

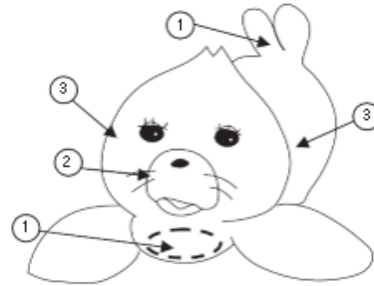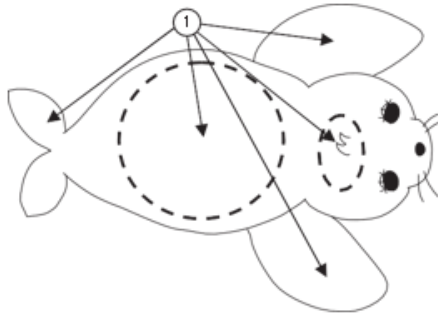


- | | |
|---------------|---|
| (1) Kosketus | Pää, selkä, etu- ja takaräpylät, leuka, viikset.
Kun kosketat näitä kehon osia, PARO vastaa. |
| (2) Näkö | PARO pystyy erottamaan valon voimakkuudet sekä valonvälähdykset. |
| (3) Kuulo | PARO tunnistaa tervehdyksen ja keuhvat sanat ja voi oppia oman nimensä.
Samalla PARO tunnistaa suunnan, josta ääni tulee. |
| (4) Asento | PARO tunnistaa, miten päin sitä pidellään ja sen kehon asennon. |
| (5) Ääntelyt | PARO voi äännellä, kun sitä kosketetaan tai sen nimeä kutsutaan. |
| (6) Liike | PARO voi ilmaista tunteitaan liikuttamalla päätänsä, etu- ja takaräpylöitä sekä avaamalla ja sulkemalla silmänsä.
Kun käyttäjä häiritsee PAROn liikkeitä, PARO tärisee. Tämä vaste suojaa sen niveliä ja on normaalia. |
| (7) Lämpötila | PARO lakkaa liikkumasta, jos PARO on ollut aktiivinen pitkään tai se on lämpimässä huoneessa, koska PARO ei halua olla kuumassa.] |

Turvallisuus:

Paro on sähköllä toimiva laite, joten sitä tulee käyttää sähköturvallisesti. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran. Paroa ei voi pestä eikä muullakaan tavoin kastella, eikä sen koneistoa saa avata tai purkaa. **Lapset eivät saa keskenään käyttää Paroa**, vaan aikuisen tulee aina olla mukana Paron kanssa toimittaessa. Tarkemmat varoitukset löytyvät englanninkielisestä ohjeesta.

Kuvat:

<http://www.parorobots.com/pdf/PARO%20Manual-2015-09.pdf>

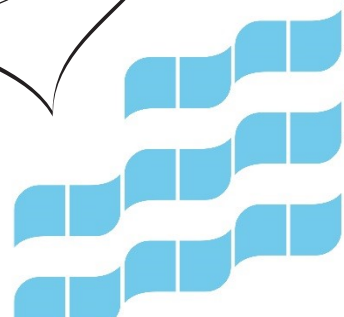

Latausohje

- 1) Varmista, että robotista on suljettu virta ennen latauksen aloittamista.
- 2) Kytke pistoke verkkovirtaan, POWER valo syttyy laturissa.
- 3) Poista tutin mallisesta latauspäästä turvakorkki "safety cap" ja aseta se robotin suussa sijaitsevaan vastakappaleeseen, CHARGE valo syttyy laturissa.
- 4) CHARGE valon palaessa robotti latautuu.
- 5) CHARGE valon sammuesssa, robotti on täysin ladattu. Tämä kestää noin kolme tuntia.
- 6) Huomaathan, että robotin akun tulisi olla tyhjä ennen uudelleen lataamista.
- 7) Voit käyttää Paroa myös latauksen aikana, jolloin täyteen latautuminen kestää enemmän kuin kolme tuntia.



Kuva: Martta Pyökkimies

